

Indicaciones en intervenciones a pacientes con OCD con sospecha o COVID-19 positivo



- 1. Continuar usando el tratamiento** ya que éste es indispensable para que la enfermedad se mantenga estable y evitar descompensaciones.
- 2. Continuar empleando la medicación y pautas** de su prescriptor.
- 3.** Dormir en una **habitación separada** con la **puerta cerrada**, en caso de convivir con más personas en el domicilio y **ventilar la estancia cada día**.
- 4.** Adoptar las **medidas habituales de aislamiento y extremar la higiene** del domicilio, equipamiento y fungible:
 - **Mascarilla de oxígeno y gafas nasales:** deben lavarse minuciosamente con agua, jabón y/o solución desinfectante.
 - **Filtro entrada de aire:** quitar diariamente el polvo del filtro y lavar con agua templada y solución jabonosa enjuagando bien, quitando el exceso de agua y secándolo con papel hasta observar que no queda humedad.
Alternar filtros para asegurar el secado tras limpieza (entrega de 2 unidades).
 - **Alargadera y superficie externa del equipo:** lavar con agua y detergente suave estando desconectado de la red eléctrica.
- 5.** Se precisa una sencilla adaptación temporal del material (emplear hasta resolución infección):
 - Para **caudales inferiores a 6 l/min**, recomendar **colocar una mascarilla quirúrgica (del paciente) sobre las gafas nasales**, la mascarilla de oxígeno convencional o la mascarilla venturi según tenga prescrito para evitar el escape de aerosol espiratorio.
 - En caso de **caudales superiores a 6 l/min**, entregar una **mascarilla con filtro de aire exhalado**.



Recomendaciones basadas en las indicaciones de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) y la Sociedad Francesa de Neumología (SPLF) sobre el uso de las terapias respiratorias en el marco de la epidemia de COVID-19.